

CRP kalibrátorová sada 5 úrovní

Kapalné kalibrátory na lidském základu pro použití jako kalibrátorů v imunoturbidimetrických analýzách CRP.



OBSAH

A00713 5 x 1 mL CRP kalibrátorová sada 5 úrovní

SLOŽENÍ

Dialab CRP kalibrátorová sada 5 úrovní je založena na lidské plazmě a pohrudniční tekutině obsahující vysoké hladiny CRP s fosfátovým pufrům.

Azid sodný 0.095 %

PŘÍPRAVA

Kalibrátory CRP jsou kapalné a připravené k použití.

STABILITA A SKLADOVÁNÍ

Skladování 2-8 °C
 Stabilita Do data expirace
 Stabilita po otevření 6 týdnů při 2-8 °C
 NEZAMRAZUJTE!!

POKYNY K POUŽITÍ

1. Tyto kalibrátory použijte stejným způsobem, jaký je specifikován pro použitou reagensi nebo přístroj.
2. Kalibrátory nechejte před použitím ustábit na pokojovou teplotu (22-28 °C).
3. Kalibrátory by se neměly nechávat stát opakovaně delší doby (do 6 hodin) při pokojové teplotě. Vialky držte pevně uzavřené, když se nepoužívají, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci. Když se nepoužívají, držte vialky v lednici.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pouze pro in vitro diagnostické použití.
2. Každé individuální darování krve určeno pro výrobu proteinového kalibrátoru bylo testováno na povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg), protilátky anti hepatitidy C, (anti-HCV) a anti-HIV 1 a HIV-2 pomocí FDA vyžadovaných testů. Protože žádná testovací metoda nezaručí, že produkt odvozený z lidské krve neobsahuje viry HIV-1/2, hepatitidy B a hepatitidy C, je třeba s tímto materiálem a všemi patientskými vzorky zacházet jako s materiály schopnými přenosu infekčních chorob.
3. S reagensy obsahujícími azid sodný je třeba zacházet se zvýšenou opatrností. Nekonzumujte a zabraňte styku s pokožkou nebo sliznicemi! Azid sodný může vytvářet výbušné azidy po kontaktu s těžkými kovy jako měď nebo olovo.

LIKVIDACE ODPADU

Postupujte prosím podle místních právních požadavků.

DATA ANALÝZY SPECIFICKÁ PRO ŠARŽI

Hodnoty a datum expirace jsou specifické pro šarži.

ŠARŽE: 02103		EXP: 2020-04
Parametr	Hladina	Přiřazená hodnota
CRP	Hladina 1	0.73 mg/L
CRP	Hladina 2	1.49 mg/L
CRP	Hladina 3	3.02 mg/L
CRP	Hladina 4	11.36 mg/L
CRP	Hladina 5	22.33 mg/L

Hodnoty jsou vysledovatelné k ERM-DA474/IFCC

