



CHLORID VÁPENATÝ, 0.020 M

Pro použití při stanovení APTT

REF

Cont.

C03101 5 x 10 mL Chlorid vápenatý, 0.020 M

Dodatečně nabízené:

C01130 5 x 8 mL Kapalina APTT-EA

C01130SV 1 x 10 mL Kapalina APTT-EA

Pouze pro profesionální in vitro diagnostické použití

OBEZNÉ INFORMACE

Počet testů

C03101	500 testů	Manuální metoda
	1000 testů	Mikrometoda (pro DiaCheck CP4)
	2000 testů	Čtvrtinová metoda (pro DiaCheck C1, C2, C4)

SLOŽENÍ REAGENCE

Chlorid vápenatý 0,020 M

Azid sodný 0,95 g/l

PŘÍPRAVA REAGENCE

Reagence je připravena k použití.

STABILITA A SKLADOVÁNÍ

Podmínky

chráňte před sluncem
 zavřete okamžitě po použití

Skladování


při 2-8 °C

Stabilita

Do data expirace
 Otevřená reagence je stabilní 30 dní
 při 2-8 °C v původní vialce.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Roztok chloridu vápenatého obsahuje azid sodný. Azid sodný za kyselých podmínek vytváří extrémně toxickou azidovodíkovou kyselinu. Azidové sloučeniny je třeba před likvidací zředit tekoucí vodou. Po likvidaci je třeba azidové sloučeniny spláchnout velkými objemy vody. Tato opatření se doporučují pro zamezení usazování v kovových potrubích, ve kterých mohou vzniknout výbušné podmínky.

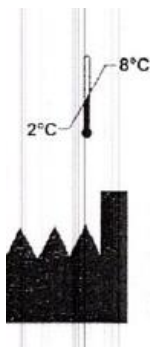

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch – technisch
 Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
 A – 2351 Wiener Neudorf, Austria
 IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55
 Phone: ++43 (0) 2236 660910-0
 Fax: ++43 (0) 2236 660910-30 e-mail: office@dialab.at